



Śruba Gojąca Wąska



Śruba Gojąca Szeroka

Śruby Gojące

- Karta Produktu

System Alpha Bio Tec zapewnia wybór Śrub gojących:

- Wąskich **Slim Platform** – wysokość 3 do 5 mm, średnica 3.85 mm
- Standardowych **Standard Platform** - wysokość 2 do 7 mm; średnica 4.6 mm
- Szerokich **Wide Platform** (oprócz implantów Ø 5 mm to Ø6 mm) – wysokość 3 do 5 mm; średnica 5 do 7.8 mm.
- Szerokich **Wild Platform** dla implantów Ø5 mm to Ø6 mm (oprócz I.C.E.) – wysokość 3 to 5 mm, średnica 6 mm and 6.3 mm.

Prezentowane śruby gojące stosowane są do implantów z wewnętrznym hexem 2.5 mm, przy platformie protetycznej implantów 3.3; 3.75; 4.2; 5 i 6 mm.

Śruby gojące:

- Kształtują otwartą śluzówkę w celu otrzymania **właściwego profilu wyłaniania**.
Profil wyłaniania to kształt tkanki miękkiej (dziąsła) wokół odbudowywanej korony zęba.
- Posiadają polerowaną tytanową powierzchnię dla doskonałej przyswajalności przez tkankę miękką
- Oznaczenia poziome (co 1mm) pomagają dobrać odpowiednią wysokość śruby gojącej do grubości tkanki miękkiej (śluzówki)
- Górna część śrub gojących jest oznakowana laserowo, dla wygodnej identyfikacji jej wymiarów

Wskazanie chirurgiczne / etap leczenia.

Śruba gojąca wkręcana jest w implant po odkręceniu śruby zamykającej. Lekarz zakłada ją na 2 do 3 tygodni. Śruba goi i kształtuje dziąsło (profil wyłaniania) wokół przyszłej korony, by uzyskać naturalny kształt.

