


Nr Kat. 4612

ZESTAW 20 STOPERÓW

do wiertel powlekanych

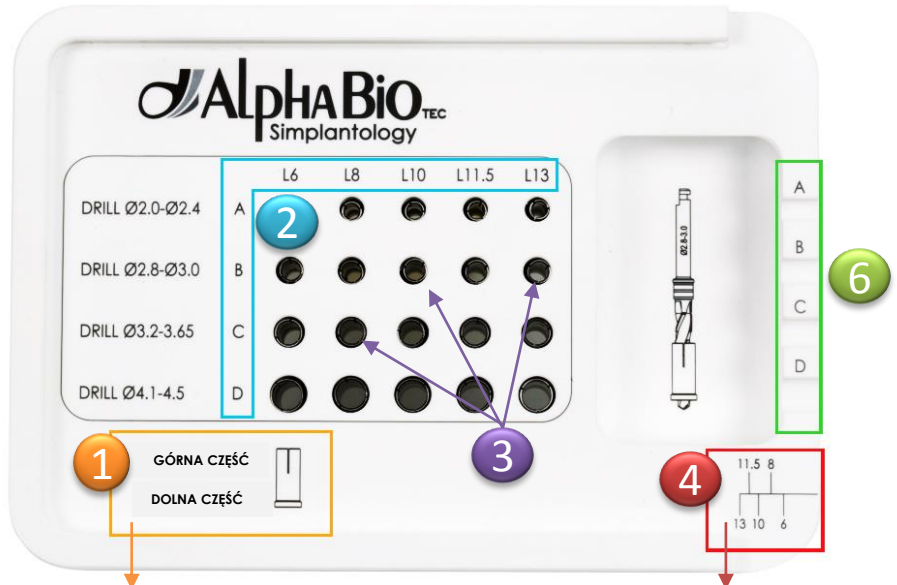

✓ Kasetka jest lekka, kompaktowa ergonomiczna i odporna na uderzenia.

✓ Możliwość sterylizacji w autoklawie (1000 procesów).

Materiały:

Kasetka: Radel®
Rynienka - PPHT

Wymiary kasetki:
13cm X 9.5cm X 3cm
Nr kat. 4612

✓ Stopery są kompatybilne z wiertłami powlekanymi.

✓ Laserowo wykonane oznaczenia są trwałe i wygodne do czyszczenia.




1 Stoper szerszą częścią jest skierowany w dół. Upewnij się, że wszystkie stopery są prawidłowo ustawione.



2 Wybierz stoper średnicy nawiercania - wiersze A,B,C,D, i głębokości nawiertu - kolumny L6/ L8/ L10 / L11.5 / L13.



3 „Click in” – wstaw wiertło w wybrany stoper

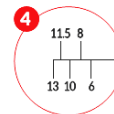

4 Opcjonalnie / zweryfikować głębokość nawiertu przy użyciu paska wymiarów



5 Wierłka stosowane są zgodnie z Protokołem Nawiercania – do zatoczenia.



6 „Click out” - usuń stoper przy użyciu bocznych rowków



7 Stopery muszą być oczyszczone*, wysterylizowane i umieszczone w kasecie
* zeskanuj instrukcje obsługi





Średnica wiertła	Group A: Ø 2.0 - Ø 2.4					Group B: Ø 2.8 - Ø 3.0				
	L6	L8	L10	L11.5	L13	L6	L8	L10	L11.5	L13
Długość wiertła										
Kod	DS-A-L6	DS-A-L8	DS-A-L10	DS-A-L11.5	DS-A-L13	DS-B-L6	DS-B-L8	DS-B-L10	DS-B-L11.5	DS-B-L13
Nr. Kat.	4561	4562	4563	4564	4565	4566	4567	4568	4569	4570

Średnica wiertła	Group C: Ø 3.2 - Ø 3.65					Group D: Ø 4.1 - Ø 4.5				
	L6	L8	L10	L11.5	L13	L6	L8	L10	L11.5	L13
Długość wiertła										
Kod	DS-C-L6	DS-C-L8	DS-C-L10	DS-C-L11.5	DS-C-L13	DS-D-L6	DS-D-L8	DS-D-L10	DS-D-L11.5	DS-D-L13
Nr. Kat.	4573	4574	4575	4576	4577	4578	4579	4580	4581	4582

Stopery do wiertel

- Są zgodne z linią wiertel powlekanych ABT
- Każdy stoper jest zaprojektowany dla dwóch średnic
- Stopery mają specjalną funkcję, która zapobiega przegrzaniu kości podczas nawiercania
- Wykonane ze stali nierdzewnej, do wielokrotnego użytku
- Mogą być wielokrotnie sterylizowane