


1

Po implantacji


Użyj klucza 1.25 mm

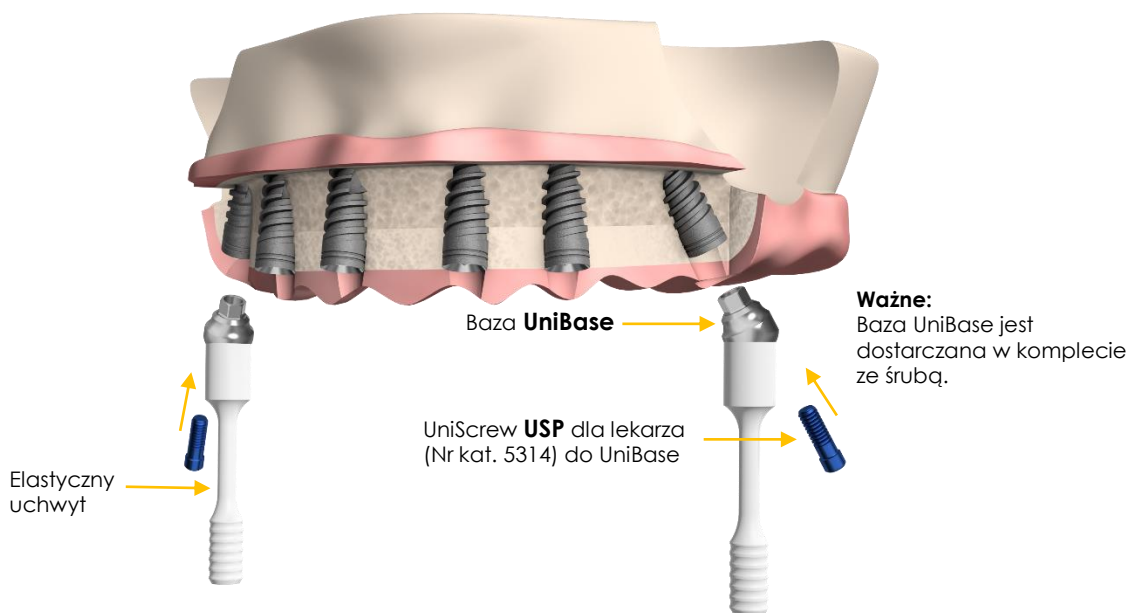

2

Założenie filarów

Użyj klucza 1.5 mm

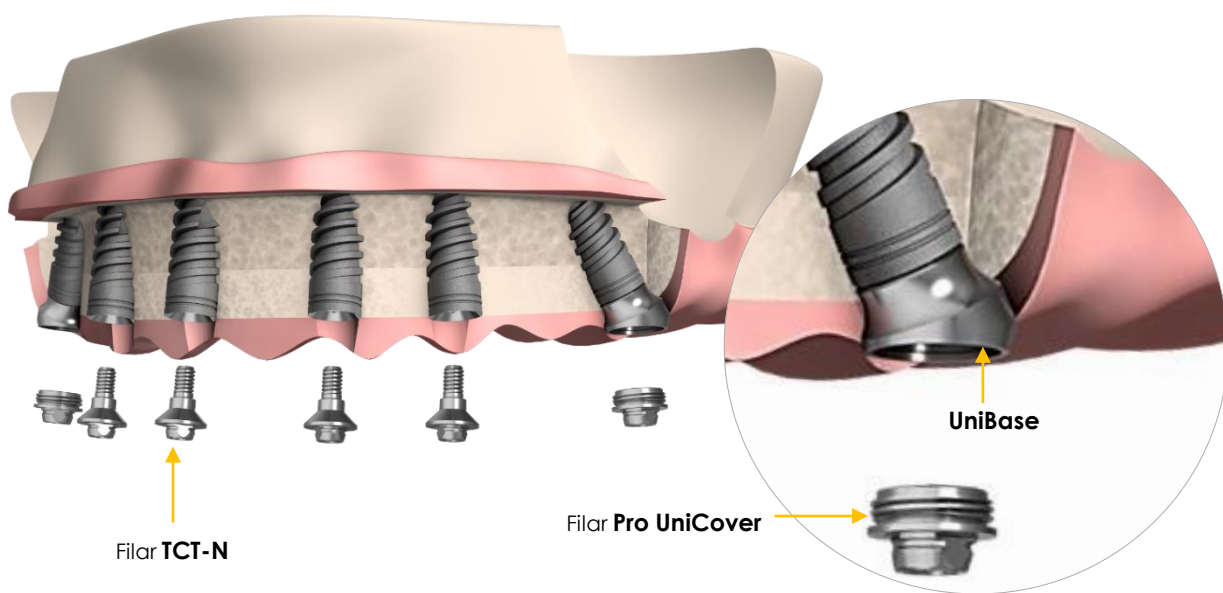


- Użyj klucza 1.25 mm
- Użyj klucza 1.5 mm

Alpha Universe Multi Unit Etapy Pracy

3 Przygotowanie wycisku z poziomu filara


Użyj klucza 1.25 mm

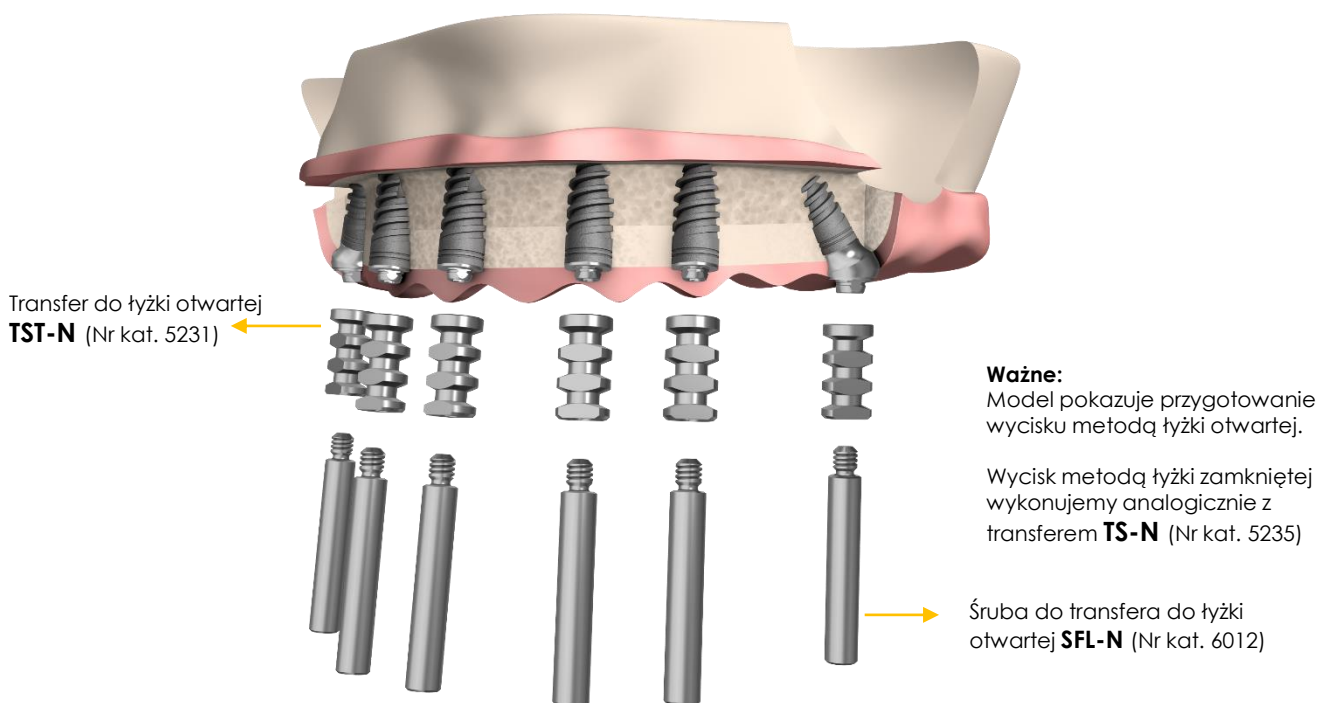

4 Wycisk metodą łyżki otwartej

Wycisk metodą łyżki zamkniętej wykonujemy analogicznie.

Użyj klucza 1.25 mm

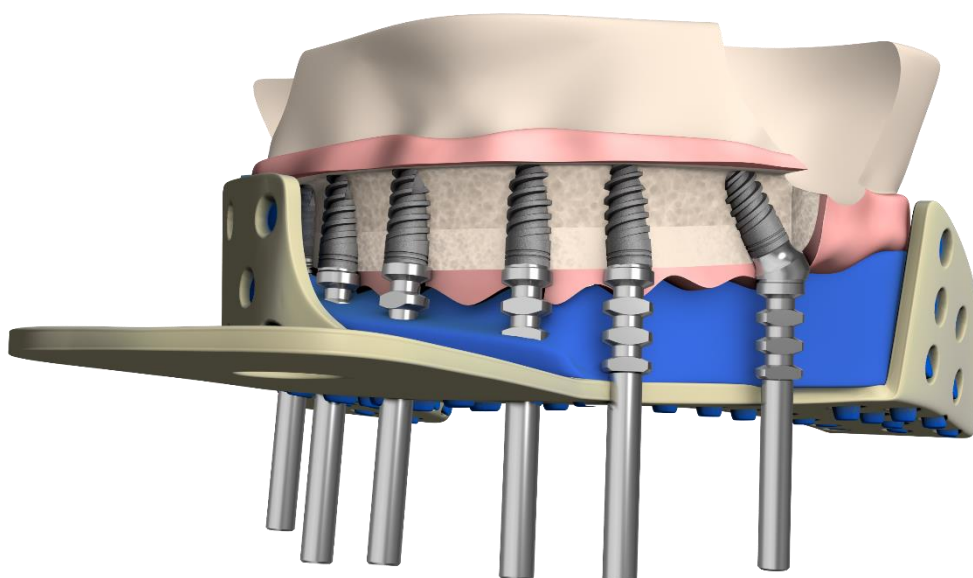


Użyj klucza 1.25 mm
 Użyj klucza 1.5 mm

Alpha Universe Multi Unit Etapy Pracy


5 Wykonanie modelu z analogami

Użyj klucza 1.25 mm

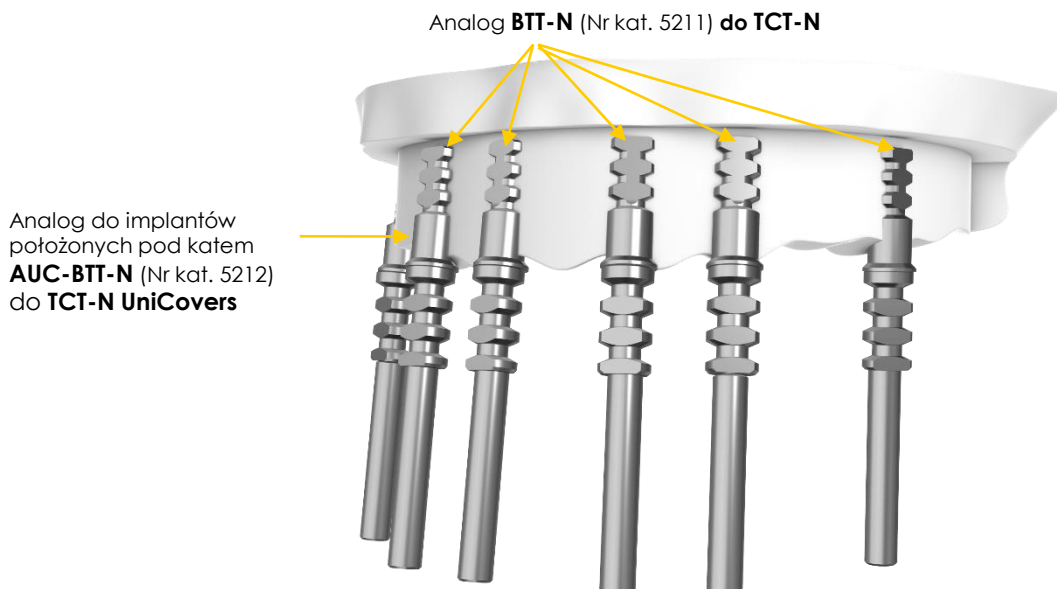

6 Modelowanie konstrukcji

Użyj klucza 1.25 mm

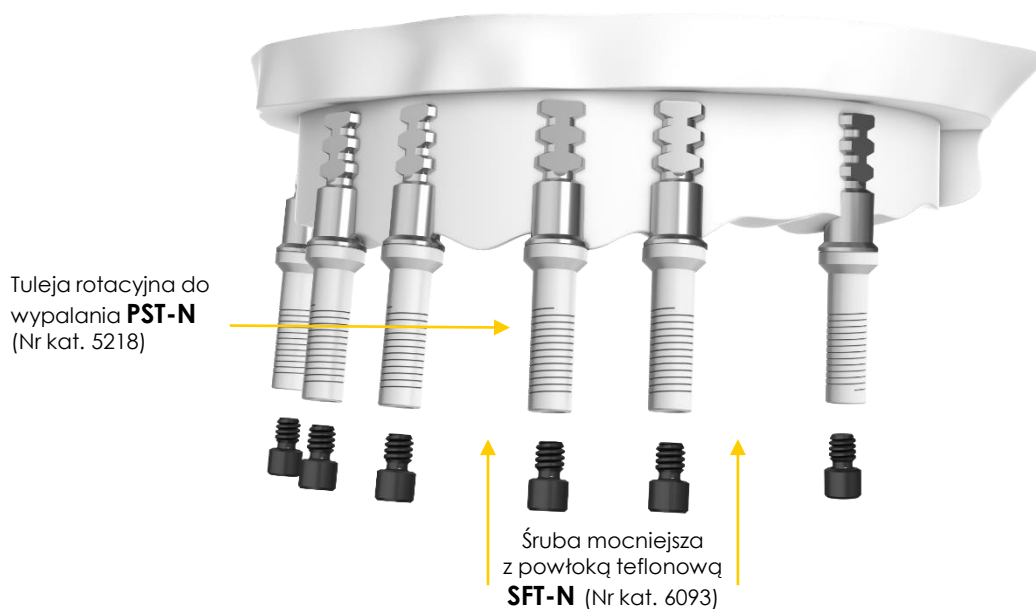

Użyj klucza 1.25 mm

Użyj klucza 1.5 mm


Zdjęcia na stronie służą jedynie celom poglądowym.

Alpha Universe Multi Unit Etapy Pracy

7

Odlew metalu

Użyj klucza 1.25 mm

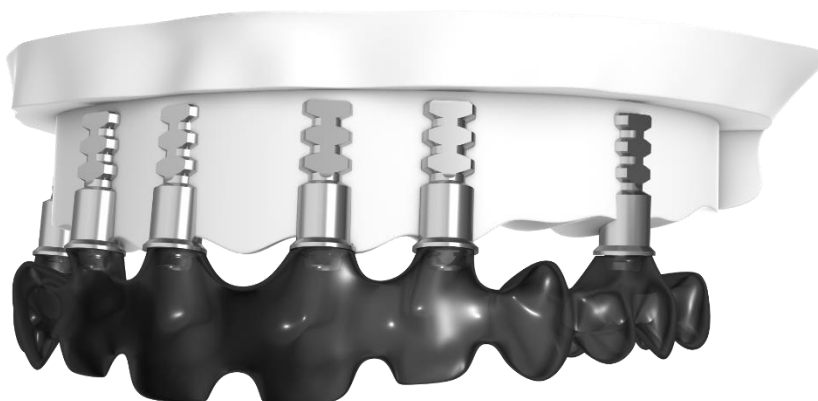


Śruba mocniejsza z powłoką teflonową
SFT-N (Nr kat. 6093)

8

Sprawdzenie dopasowania konstrukcji

Użyj klucza 1.25 mm

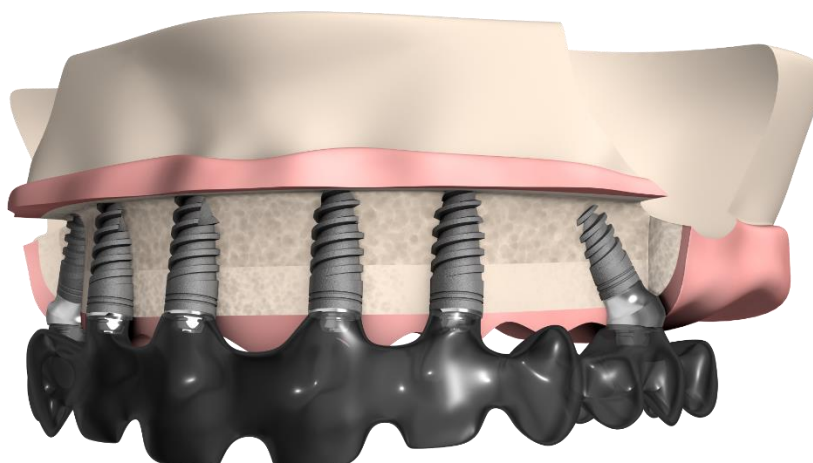

Śruba tytanowa
SF-N (Nr kat. 6092)

- Użyj klucza 1.25 mm
- Użyj klucza 1.5 mm


Zdjęcia na stronie służą jedynie celom poglądowym.

Alpha Universe Multi Unit Etapy Pracy

9

Olicowanie uzupełnienia

Użyj klucza 1.25 mm

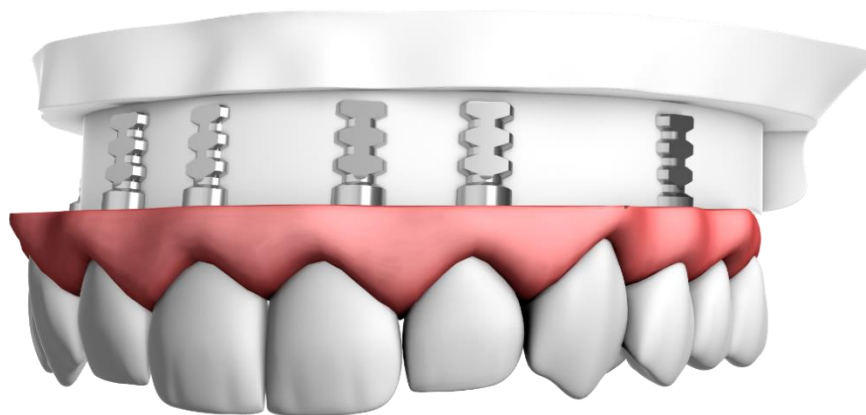


Śruba mocniejsza
z powłoką teflonową
SFT-N (Nr kat. 6093)

10


Zamontowanie odbudowy

Użyj klucza 1.25 mm

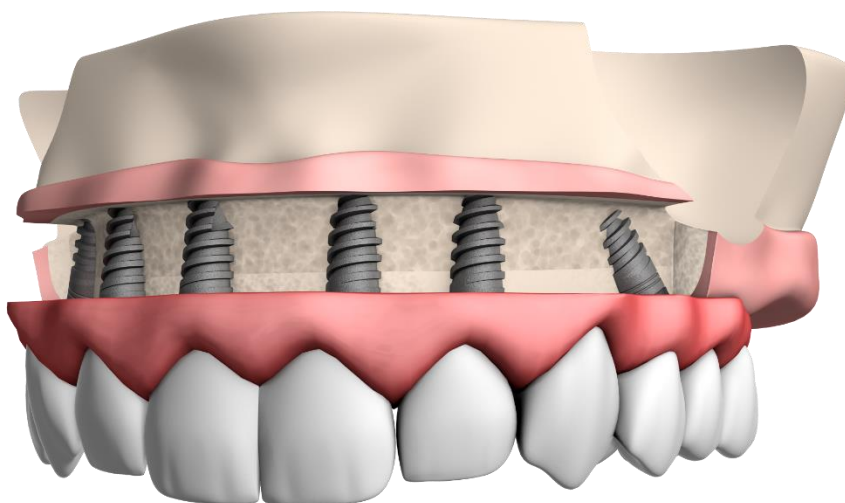

Śruba tytanowa
SF-N (Nr kat. 6092)

 Użyj klucza 1.25 mm

 Użyj klucza 1.5 mm


Zdjęcia na stronie służą jedynie celom poglądowym.


Alpha Universe Multi Unit **Etapy Pracy**

11

Sily przykręcania przy użyciu klucza dynamometrycznego

UniBase do implantu	30 Ncm
UniCover do UniBase	30 Ncm
Tymczasowe elementy tytanowe do UniCover	15 Ncm
Nasadka plastikowa do odlewu do UniCover	- tylko ręcznie - bez użycia narzędzi
Transfer do UniCover	tylko ręcznie - bez użycia narzędzi
Śruba gojąca do UniCover	10 Ncm
Praca końcowa do filara prostego	25 Ncm

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 Użyj klucza 1.25 mm

 Użyj klucza 1.5 mm

Zdjęcia na stronie służą jedynie celom poglądowym.