

Procedura chirurgiczno - protetyczna


Wycisk z poziomu filara prostego przy zastosowaniu transfera Snap-On **Etapy Pracy**

1 Montaż filara




- Zmierzyć wysokość tkanek miękkich i wybrać odpowiedni filar prosty zgodnie z wymaganą wysokością
- Umieścić filar w implancie i przykręcić śrubę. Dokręcić filar za pomocą klucza dynamometrycznego **z siłą 30 Ncm**.

2 Wycisk

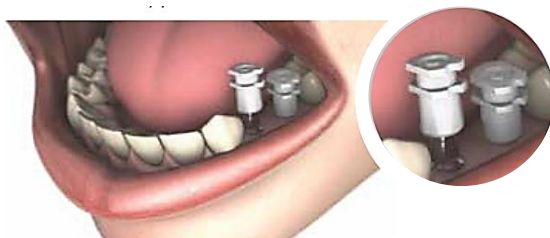

- Dokładnie umieścić plastikowy transfer wyciskowy na filarze prostym. Umieszczona na nim strzałka wskazuje ustawienie transfera po płaskiej stronie filara.
- Docisnąć transfer na filarze do momentu „kliknięcia”, co potwierdzi prawidłowe umieszczenie transfera.

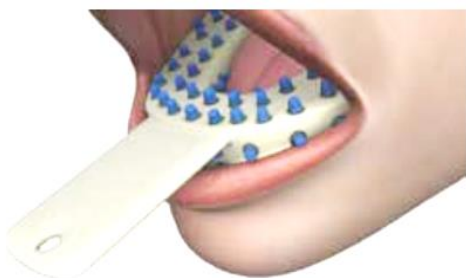

- Pobrać standardowy wycisk na łyżce zamkniętej. Transfery pozostaną w masie wyciskowej, po wyjęciu łyżki z jamy ustnej pacjenta.

3 Przekazanie wycisku do laboratorium



- Przekazanie wycisku do laboratorium protetycznego w celu wykonania modelu protetycznego.

Rozwiązanie - Usunąć filar z implantu, umieścić go w wycisku i wysłać do laboratorium protetycznego (odbudowa ostateczna)

Do w/w procedury zastosuj filary proste i transfer