





Chirurgiczny Protokół Nawiercania

ARRP – stosowany do wszystkich typów kości typu D1, D2, D3 i D4



Kolejność zastosowania wiertel prostych powlekanych

Kolejność zastosowania wiertel ze stali nierdzewnej

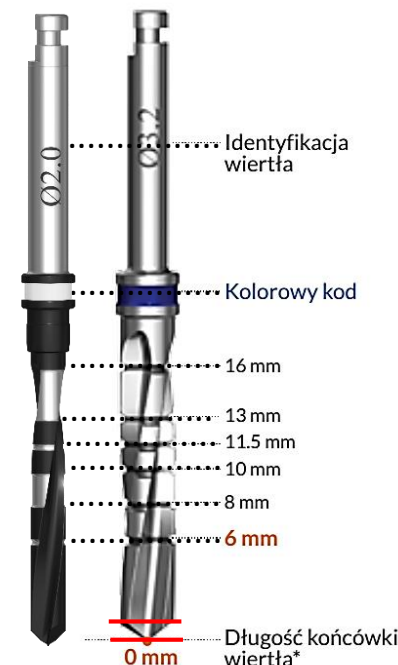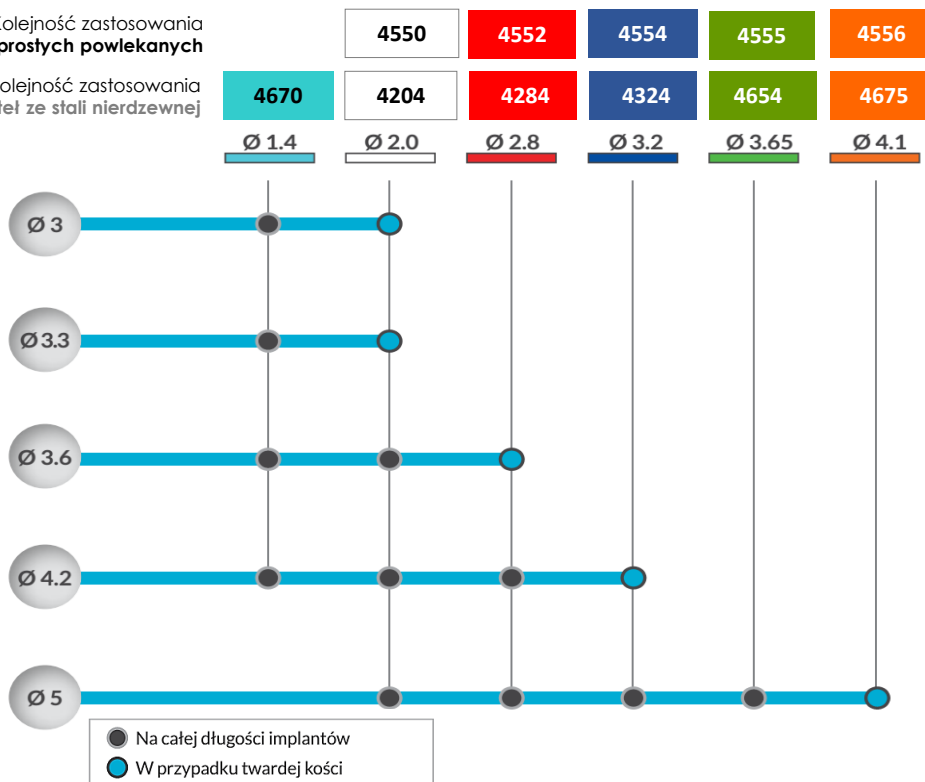

* Długość wiertła jest mierzona od wierzchołka do znakowanej głębokości nawiertu

* W wiertłach Ø 2.0, Ø 2.8, Ø 3.2, Ø 3.65, Ø 4.1 wysokość końcówki wiertła jest wliczona w długość wiertła

Ważne!
W przypadku wiertła Ø 1.4 wysokość końcówki wiertła nie jest wliczona w długość wiertła

- Ważne:**
- W przypadku wystąpienia wyjątkowo twardej kości zaleca się skorygować nawiert wg protokołu nawiercania.
 - W trakcie nawiertu należy uwzględnić długość końcówki wiertła.
 - Protokół postępowania zalecany jest dla wszystkich przypadków klinicznych.



Wiertła **PROSTE** Stal Nierdzewna
Nr kat / kolorowy kod











Ø 2.0	Ø 2.5	Ø 3.0	Ø 2.8	Ø 3.2	Ø 3.65	Ø 4.1	Ø 4.5	Ø 4.8	Ø 5.2	Ø 5.8
4204	4244	4306	4284	4324	4654	4675	4676	4677	4684	4686













Wiertła **PROSTE POWLEKANE**
Nr kat / kolorowy kod

Ø 2.0	Ø 2.4	Ø 3.0	Ø 2.8	Ø 3.2	Ø 3.65	Ø 4.1	Ø 4.5	Ø 4.8	Ø 5.2	Ø 5.8
4550	4551	4306	4552	4554	4555	4556	4557	4558	4559	4560

Stopery do wiertel **POWLEKANYCH**
Nr kat / kolorowy kod

Średnica wiertła	Group A: Ø 2.0 - Ø 2.4					Group B: Ø 2.8 - Ø 3.0				
	L6	L8	L10	L11.5	L13	L6	L8	L10	L11.5	L13
										
Kod	DS-A-L6	DS-A-L8	DS-A-L10	DS-A-L11.5	DS-A-L13	DS-B-L6	DS-B-L8	DS-B-L10	DS-B-L11.5	DS-B-L13
Nr. Kat.	4561	4562	4563	4564	4565	4566	4567	4568	4569	4570

Średnica wiertła	Group C: Ø 3.2 - Ø 3.65					Group D: Ø 4.1 - Ø 4.5				
	L6	L8	L10	L11.5	L13	L6	L8	L10	L11.5	L13
										
Kod	DS-C-L6	DS-C-L8	DS-C-L10	DS-C-L11.5	DS-C-L13	DS-D-L6	DS-D-L8	DS-D-L10	DS-D-L11.5	DS-D-L13
Nr. Kat.	4573	4574	4575	4576	4577	4578	4579	4580	4581	4582