




Chirurgiczny Protokół Nawiercania

ATID - zalecany do kości typu D1 i D2



Kolejność zastosowania **Wiertła PROSTYCH**

Ø Implantu	Kość Miękka D4	Kość Średnia D2 ; D3	Kość Twarda D1
Ø 3.3	2.0	2.0	2.0
	2.8	2.8	2.8
	3.2 Cortical	3.2	3.2
			3.65 Cortical
Ø 3.75	2.0	2.0	2.0
	2.8	2.8	2.8
	3.2 Cortical	3.2	3.2
			3.65 Cortical
Ø 4.2	2.0	2.0	2.0
	2.8	2.8	2.8
	3.2	3.2	3.2
	3.65 Cortical	3.65	3.65
			4.1 Cortical
Ø 5.0	2.0	2.0	2.0
	2.8	2.8	2.8
	3.2	3.2	3.2
	3.65	3.65	3.65
	4.1	4.1	4.1
	4.5 Cortical	4.5	4.5
Ø 6.0			4.8 Cortical
	2.0	2.0	2.0
	2.8	2.8	2.8
	3.2	3.2	3.2
	3.65	3.65	3.65
	4.1	4.1	4.1
	4.8	4.8	4.8
	5.2 Cortical	5.2	5.2
		5.8 Cortical	

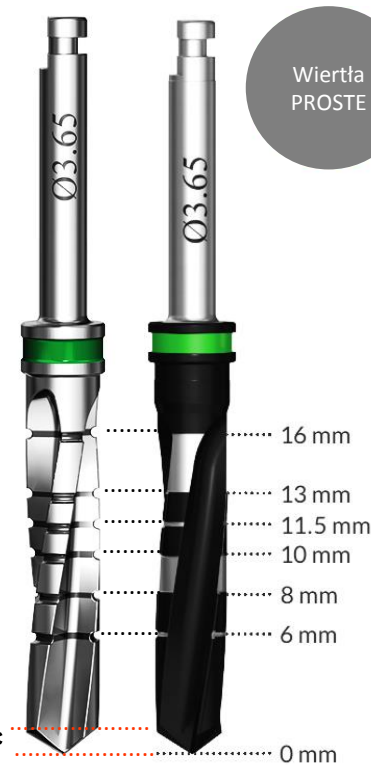

- * Długość końcówki wiertła mierzona jest od wierzchołka do znakowanej głębokości nawiertu.

Cortical – nawiert przez kość korykalną
 Protokół postępowania zalecany jest dla wszystkich przypadków klinicznych.

Modele i rozmiary wiertel



Wiertła **PROSTE** Stal Nierdzewna
Nr kat / kolorowy kod



Ø 2.0	Ø 2.5*	Ø 2.8	Ø 3.0**	Ø 3.2	Ø 3.65	Ø 4.1	Ø 4.5	Ø 4.8	Ø 5.2	Ø 5.8
4204	4244	4284	4306	4324	4654	4675	4676	4677	4684	4686

* Wierćto Ø 2.5 mm nie jest umieszczone w protokołach nawiercania. Jest ono oferowane jako opcja dla poszerzenia możliwości pracy chirurga.

Wiertła **PROSTE POWLEKANE**
Nr kat / kolorowy kod



Ø 2.0	Ø 2.4	Ø 2.8	Ø 3.0**	Ø 3.2	Ø 3.65	Ø 4.1	Ø 4.5	Ø 4.8	Ø 5.2	Ø 5.8
4550	4551	4552	4553	4554	4555	4556	4557	4558	4559	4560

** Wierćto Ø 3.0 mm jest używane tylko do implantów NICE.

Stopy do wiertel **POWLEKANYCH**

Średnica wiertła	Group A: Ø 2.0 - Ø 2.4					Group B: Ø 2.8 - Ø 3.0				
	L6	L8	L10	L11.5	L13	L6	L8	L10	L11.5	L13
Długość wiertła	[Visual representation of drill bit lengths]									
Kod	DS-A-L6	DS-A-L8	DS-A-L10	DS-A-L11.5	DS-A-L13	DS-B-L6	DS-B-L8	DS-B-L10	DS-B-L11.5	DS-B-L13
Nr. Kat.	4561	4562	4563	4564	4565	4566	4567	4568	4569	4570

Średnica wiertła	Group C: Ø 3.2 - Ø 3.65					Group D: Ø 4.1 - Ø 4.5				
	L6	L8	L10	L11.5	L13	L6	L8	L10	L11.5	L13
Długość wiertła	[Visual representation of drill bit lengths]									
Kod	DS-C-L6	DS-C-L8	DS-C-L10	DS-C-L11.5	DS-C-L13	DS-D-L6	DS-D-L8	DS-D-L10	DS-D-L11.5	DS-D-L13
Nr. Kat.	4573	4574	4575	4576	4577	4578	4579	4580	4581	4582